

AntiRust Med

**αντισκωριακό
εργαλείων**

συμπυκνωμένο



400 ml



1000 ml

αντισκωριακό ανοξειδωτων εργαλείων συμπυκνωμένο

Το **AntiRust Med** είναι συμπυκνωμένο υγρό κατάλληλο για **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**.

- Ασφαλές και αποτελεσματικό χωρίς να φθείρει το χρυσό των εργαλείων.
- Απομακρύνει λεκέδες, σημάδια, αποχρωματισμούς και σκουριά
- Δεν καταστρέφει τα εργαλεία ακόμα και αν παραταθεί ο χρόνος παραμονής στο διάλυμα.

Να μην χρησιμοποιείται σε εργαλεία ασημένια, επιχρωμιωμένα και με μείγμα τιτανίου.

Κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικά και οδοντιατρικά εργαλεία όπως: ανοξειδωτοι δίσκοι, νυστέρια, ψαλίδια, λαβίδες, λάμες κ.α.

Διατήρηση της ποιότητας των εργαλείων: Η σκουριά μπορεί να καταστρέψει τα ιατρικά εργαλεία καθιστώντας τα ακατάλληλα για χρήση. Χρησιμοποιώντας το αντισκωριακό AntiRust Med μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των εργαλείων και να διατηρήσετε την **ποιότητά** και την **λάμψη** τους.

Αποθήκευση σε σωστές συνθήκες: τα ιατρικά εργαλεία πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό μέρος μακριά από την υγρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει σκουριά.

Η **χρήση** του **αντισκωριακού AntiRust Med** στα ιατρικά εργαλεία είναι **απαραίτητη** για τη διατήρηση της υγείας των ασθενών, την πρόληψη λοιμώξεων και την διασφάλιση της αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης.

Περιέχει τουλάχιστον 15% αλλά κάτω του 30% φωσφορικές ενώσεις καθώς και κάτω του 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

UFI: F600-80PS-U00T-5DU7

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Αυτόματα & Υπερήχων:

από 20 ml/ lt νερού. Εάν είναι αναγκαίο αυξάνετε ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για όλες τις θερμοκρασίες νερού.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ:

Τοποθετήστε το διάλυμα σε πλαστικό ή ανοξειδωτο δοχείο και βυθίστε τα εργαλεία καθαρά και ανοιγμένα για 10 – 30 λεπτά. Ξεβγάλετε με άφθονο νερό.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ:

Χρησιμοποιείστε γάντια και τρίψτε το καθαρό καρότσι ή το δίσκο με μια σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική) και με το επιθυμητό διάλυμα. Ξεβγάλετε με άφθονο νερό.

